

静かで快適な同調、操作もカンタン。  
お出かけをしっかりとサポートする  
エボリューション



OM-904J



OM-903J

### 静かで快適な吸入を実現

酸素が供給される時の耳障りな吐出音をできるだけ減らし、患者さまに快適にご使用いただけるようになりました。

### 電池が4倍以上\*も長持ち

エボリューションは電池が800時間以上も持続します。電池の消費量が少なく、交換の手間も軽減されます。\*他社モデルと比較した場合。当社調べ。

### 安心の実績、CHAD社製

エボリューションは、呼吸同調器の製造に30年以上の実績を誇る米国CHAD社製。また、呼吸療法で世界的に著名なブライアン・タイプ博士の推奨するトリガー方式を採用。実績に裏づけされた、安心の呼吸同調器です。

### 5倍\*の酸素節約効率

エボリューションは酸素節約効率が約5倍。抜群の節約効率を誇ります。\*当該他社品と比較。当社調べ。

### 通常流量と大流量の2タイプ

同調モードでの流量が、0.5~3L/分相当のOM-904Jと1~6L/分相当のOM-903Jの2機種をご用意。多様なニーズにお応えします。

### カンタン操作の日本仕様

エボリューションの操作は、わずか3ステップの手間いらず。また、酸素ボンベから装置を取り外す際に、ボンベに残っている圧力を除去する残圧処理機能をプラス。装置の取り外しがラクになりました。

# 3ステップだけのカンタン操作。エボリューション

操作方法


## 1 電源入

電源スイッチ  を押す

呼吸同調フラッシュランプが右回りに点灯し、直前に使用していた流量値で停止します。

## 2 流量設定

流量設定ボタン  で流量を設定する

流量設定ボタン  の操作により、流量を変更できます。  
吸入に同調して設定された流量値のランプが点滅します。

## 3 電源切

電源スイッチ  を押す

呼吸同調フラッシュランプが左回りに点灯し、その後、消灯します。

## 電池交換

電池が消耗すると右側の電池交換ランプが点滅し、アラームが15秒間隔で鳴ります。早めに電池の交換をしてください。

## アラーム

電源オン時に呼吸が30秒以上検出されないと、異常を知らせるアラームが鳴り続けます。



表示・警報

仕様	名称	エボリューション
	医療機器認証番号	224AFBZX00081000
	適用酸素容器	最高充てん圧力 19.6MPa
	使用温度範囲	-10~40℃
	使用湿度範囲	相対湿度 15~95% (結露なきこと)
	設定流量	0.5、1、1.5、2、2.5、3L/分相当タイプ、1、2、3、4、5、6L/分相当タイプ
	連続流量	2L/分
	呼吸同調回数	最大40回/分
	重量	418g (電池含まず)
	寸法	W158×D69×H78mm (突起部を除く)
電池寿命	約800時間 (単3アルカリ乾電池2個) 以上	

◎製品の色は印刷物につき、実際のものとは異なって見える場合があります。◎本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合があります。

ご用命は



製造販売業者

日本ルフト株式会社

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-7-5

TEL: 03-3518-2001 FAX: 03-3518-6001