


# Fast Find Grid

## ファストファインドグリッド

CTバイオプシィ用ディスポーザブルグリッド

CTスキャン時に、正確な照準が簡単にできます!

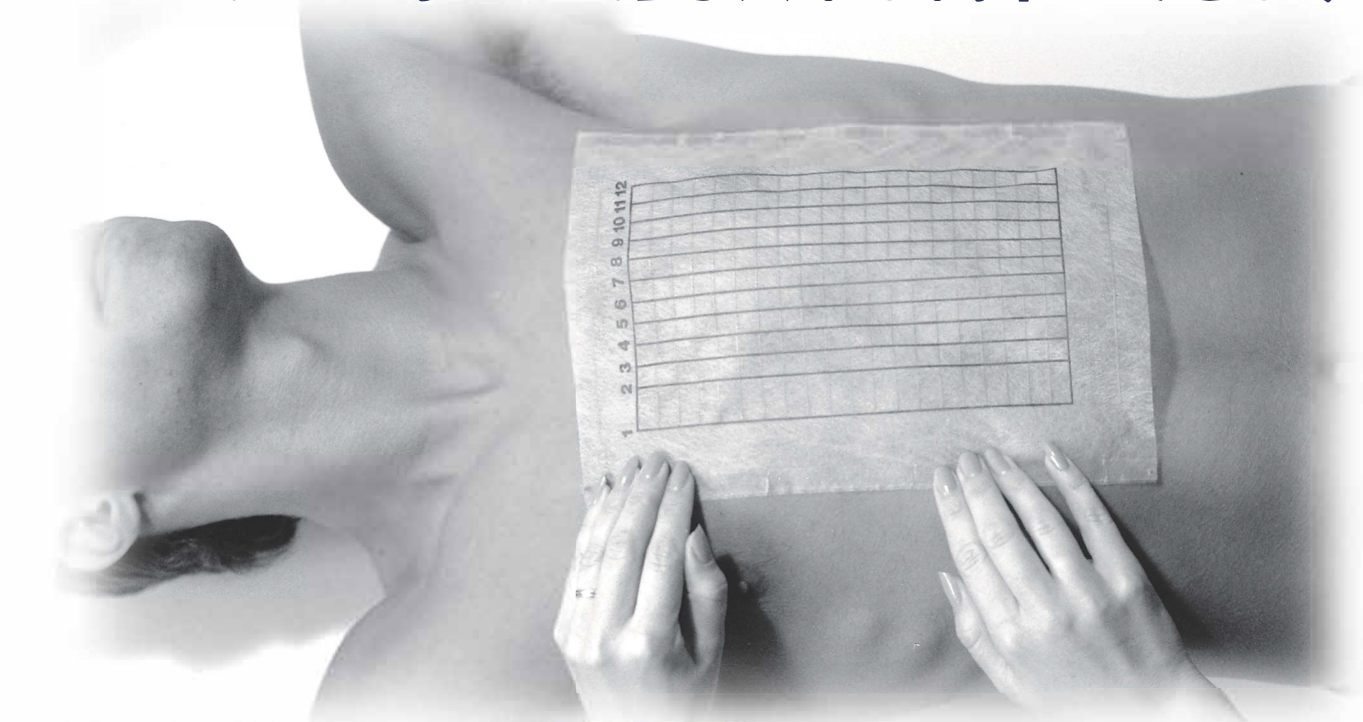

### 【使用方法】

- ①テープを剥がし、患者のターゲットエリアにグリッドを貼ってスキャンします。
- ②スキャン写真に12ドットが表示されます。(ドット幅の広いところが1番と2番です)
- ③進入しやすいドットをスキャン画像の枚数及び左右からのドット数から決め、マーキングします。
- ④グリッドの四つ角にもマーキングします。
- ⑤グリッドを外してマーキングの跡を確認します。

1冊 25枚入

輸入販売元

日本ルフト株式会社

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-7-5

TEL: 03-3518-2001 FAX: 03-3518-6001

販売代理店