


CTバイオプシ用ディスポーザブルグリッド

ファスト・ファインド・グリッド

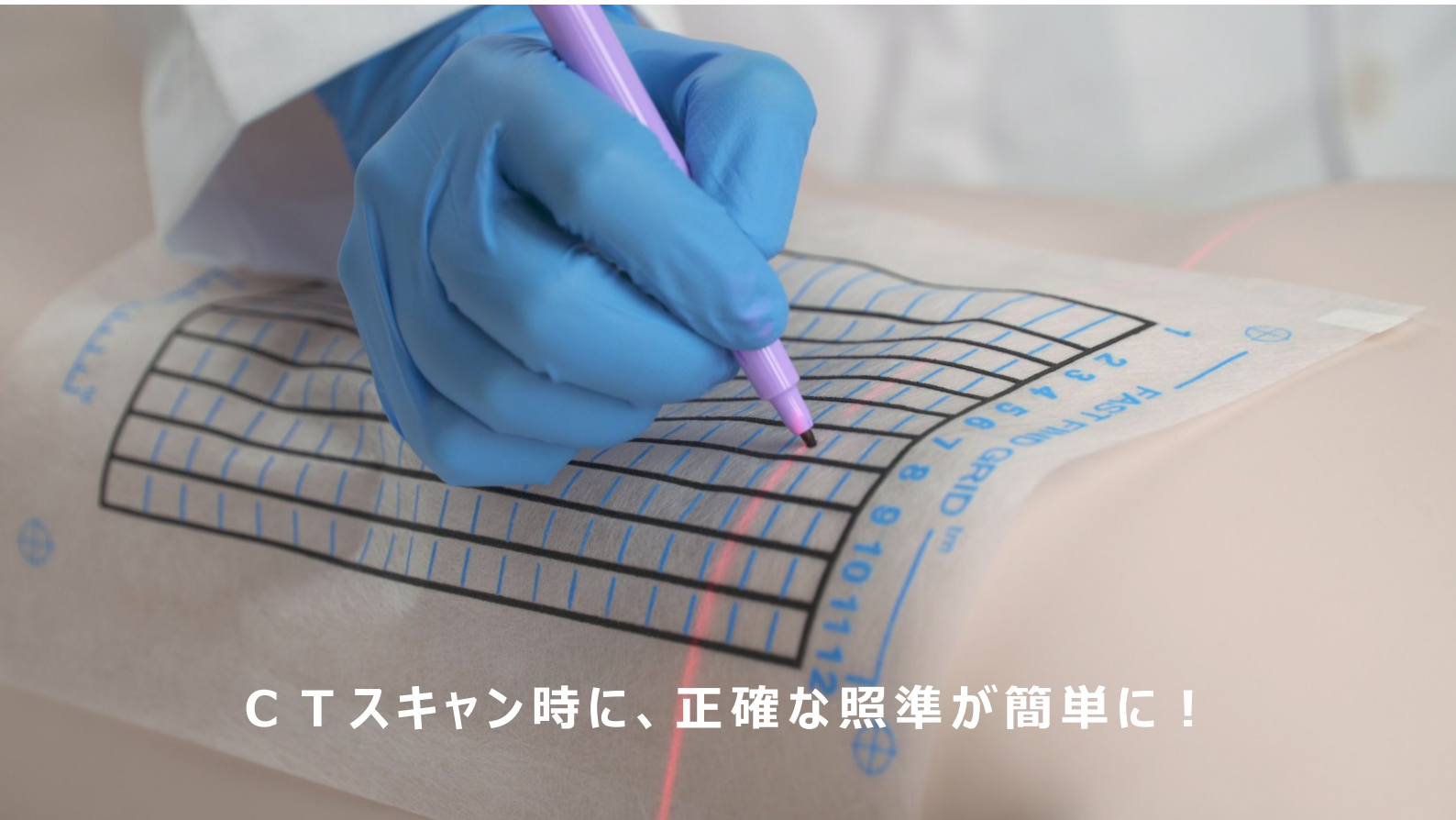

CTスキャン時に、正確な照準が簡単に！

Fast Find Grid (ファスト・ファインド・グリッド) は、すべてのCTガイド下生検、およびドレナージ術にて使用される、シンプルで使い捨て可能なシートです。体の部位や病理診断の種類に関係なく、甲状腺、肺、肝臓、腹部、骨盤、四肢などの生検およびドレナージにて利用いただけます。

放射線不透過性の線が、画像上の位置を確認するために明瞭なイメージを提供します。

検査時間の軽減

放射線不透過マーカ
ーを使用して穿刺位置の決定をサ
ポート

正確

1cm間隔の目盛りにより
穿刺位置の精度を向上

柔軟性

2本の粘着テープにより
ターゲットにフィット
柔軟性のあるシートは
貼り直しも簡単

使用方法



1
グリッド裏面の粘着テープの
剥離紙を剥がします。



2
患者のターゲットにシートを
貼り、スキャンします。




3
スキャン写真に12個のドットが
表示されます。



4
穿刺する位置を決定します。



5
レーザーラインを横切る箇所に
フェルトペンで印をつけます

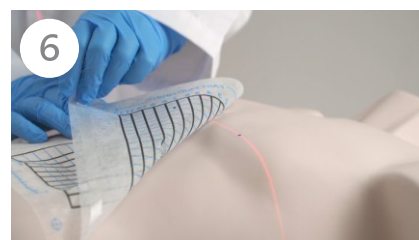

6
グリッドを取り外して検査を
行います。

製品の特長や使い方を、動画でわかりやすくご覧いただけます。
右のQRコードをスマートフォンより読み取ってご視聴ください。



製品仕様

製品名	ファストファインドグリッド
型式	EG6500
寸法	19.1 cm x 26.7 cm
グリッド寸法	12.7 cm x 20.3 cm (1cm間隔)
入り数	25 枚 / パック
滅菌の有無	非滅菌
その他	ディスポーザブル



評価用サンプル

評価用サンプルをご希望の際には弊社ホームページよりお申込みください。

- サンプルは各医療機関1回限り、1枚の提供となります。
- サンプルのご試用後は、ご評価のアンケートにご協力をお願いします。

※ 製品改良の為、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。また、印刷物と実物では多少色味の異なる場合があります。

製造販売業者

 **RUFUTO** 日本ルフト株式会社

〒336-0034

埼玉県さいたま市南区内谷7丁目2番1号

TEL : 048-839-0622

Fax : 048-838-3532

 <https://www.nihon-rufuto.com/>

お問い合わせは