

# 『安心』をいつまでも。 ベビーブレスNが見守っています



ベビーブレスNは、乳幼児に無体動が発生すると、アラーム音とアラーム表示灯の点滅で異常を知らせるベビーセンサーです。

病院はもちろん、託児所や保育園でもご利用いただけます。

ベビーブレスNを託児所や保育園などに導入することで、より安心、安全な保育が可能になります。乳幼児のSIDS(乳幼児突然死症候群)対策として、ご活用ください。

乳 幼 児 体 動 モ ニ タ

# Baby Breath <sup>N</sup>

## ベビーブレスN

届出番号 13B1X00272000006

お求めやすい  
価格になりました

ベビーブレスNがさらに改良されて、  
よりお求めやすくなりました。導入台数の追加や、  
お試し使用もこの機会に  
お気軽にごぞ。

# ベビーブレスNは小さなボディに 安心機能を満載

## 精度の高いバルーン式センサの採用

精度の高さや正確性に定評のあるバルーン式センサを採用しています。センサを貼り付けることで乳幼児の体動をピンポイントで正確に、適時に判断してアラームを出すことができます。

## 音と光でお知らせします

乳幼児の無体動が15秒、もしくは20秒続くとアラーム音とアラーム表示灯の点滅で異常を知らせます。

## 簡単操作。安全のための工夫も

スイッチはわずか4つだけの簡単操作。小さなお子さまがいたずらして、電源を切ってしまうような工夫も施しています。電池切れの際もブザー音と表示灯点滅でお知らせします。

## パソコンでデータ解析ができます

乳幼児が無体動の状態に陥りアラームが作動すると、無体動発生前7分間と発生後3分間の合計10分間の波形記録を自動で保存します。この波形記録は15回分保存されますので、波形記録を解析することにより医師が乳幼児の様子を知ることができます。また、電源の入切、アラーム、リセットなどの作動をログとして保存されます。ログの記録により乳幼児の様子がより詳しく判るようになります。

## 軽くてコンパクト。移動もラクラク

電源は単3電池2個のみ。ボディも軽くてコンパクトなポケットサイズなので、乳幼児を移動させる時も負担になりません。



### 仕様

販売名	ベビーブレスN
型番	BB03
一般的名称	体動センサ
医療機器届出番号	13B1X00272000006
分類	クラス1 <一般医療機器>
JMDNコード	70074000
重量	約 207 g (電池を含む)
寸法	W 76 x D 27 x H 150 mm (突起部を除く)
使用電池	電源：単3アルカリ乾電池2個、内蔵電池：ボタン型リチウム電池1個 (データ記録用)
動作温度	10 ~ 30 ℃
動作湿度	15 ~ 75 % (結露なきこと)
機能選択	無体動検出時間 15 秒 または 20 秒
無体動警報	アラーム音 (ピーツ、ピーツ) とアラーム表示灯点滅
電池残量低下警報	ブザー音 (ブツ、ブツ) と電池切れ表示灯点滅
データ記録	無体動検出アラーム発生前7分 及び 発生後3分 (合計10分) ×15回分
付属品	呼吸センサ(1m) 6本、単3アルカリ乾電池 2個、専用ポーチ、取扱説明書、添付文書、簡易取説

### ⚠ 使用上のご注意

- 本機器は乳幼児の体動を含む身体の動き (おもに胸郭の動作) の低下・停止を感知し、無体動警報を発しますが、それらの異常の原因を予防したり治療したりするものではありません。
- 本機器のご使用中に無体動警報が鳴り、乳幼児の無呼吸などの異常を発見した場合には、ただちに救急車の手配、呼吸回復などの処置を行ってください。緊急時に対処できるようあらかじめ乳幼児の緊急蘇生法を習得しておいてください。
- 本機器は乳幼児を対象として設計されています。成人では正常に機能しない可能性があります。
- 呼吸センサは劣化などにより測定に影響を与えますので定期的に交換をしてください。
- 本機器は必ず医師の指示に従ってご使用ください。

### レンタル品もご用意しております

保育園やご家庭でも安心を実感いただける、ベビーブレスNのレンタルシステム。短期間のご使用や、お試し使用にも便利なレンタルシステムのご案内は下記ホームページ上でご覧いただけます。

 <https://www.nihon-rufuto.com/>

※ 製品改良の為、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。また、印刷物と実物では多少色味の異なる場合があります。

製造販売業者

 **RUFUTO 日本ルフト株式会社**

#### ■ 本社 医療機器部

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-7-5 協販ビル  
TEL: 03-3518-2001 FAX: 03-3518-6001

#### ■ メディカルサービスセンター

〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内谷7-2-1  
TEL: 048-839-0622 Fax: 048-838-3532

 <https://www.nihon-rufuto.com/>



ISO 13485:2003 認証取得

ご用命は

BB31811