

最新のリザーバテクノロジーが
最大20L/分の高流量を可能にしました



オキシマイザーは院内ではフェイスマスクの代わりとしてご利用いただけますので、装着したままお食事ができます。
標準カニューレより酸素供給がやわらかくなりますので、高流量で経験する強い酸素の吐出を和らげます。

高流量酸素 ハイフロー仕様で **最大20L/分** の酸素供給が可能

酸素の節約 標準カニューレより最大75%の酸素を節約

QOL向上 酸素供給が柔らかくなり陽圧感がない
装着したままで食事が可能

安心の実績 30年以上の実績を誇るオキシマイザーのハイフロー仕様


仕様

項目	仕様
型式	F-224
販売名	オキシマイザー F-224
一般的名称	経鼻用酸素供給カニューレ
医療機器認証番号	227AFBZX00058000
JANコード	4571227001072
分類	管理医療機器
滅菌の有無	未滅菌
重量	57 g
最大流量	20 L/min



吸入酸素濃度の目安

※ FiO₂は実測より算出された値です。

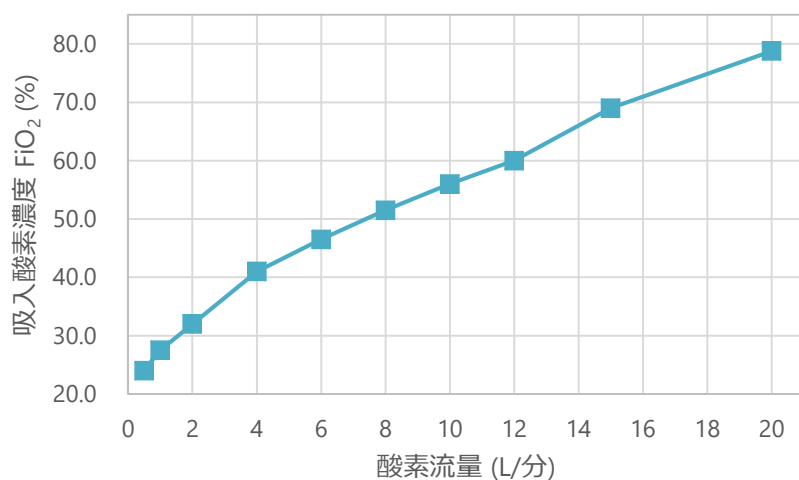

酸素流量 (L/分)	F-224 (%)
0.5	24.0
1	27.5
2	32.0
4	41.0
6	46.5
8	51.5
10	56.0
12	60.0
15	69.0
20	78.8

酸素流量の目安

標準カニューレ	オキシマイザー (F-224)	酸素節約率
2.0 L/分	0.5 L/分	75.00%
4.0 L/分	1.5 L/分	62.50%
6.0 L/分	2.5 L/分	58.33%
8.0 L/分	4.5 L/分	43.75%
10.0 L/分	6.0 L/分	40.00%
12.0 L/分	10.0 L/分	16.67%
15.0 L/分	12.5 L/分	16.67%
20.0 L/分	16.5 L/分	17.50%

オキシマイザーF-224は

酸素節約率
最大 **75%**

高流量でも
17.5%の節約

※ 製品改良の為、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。また、印刷物と実物では多少色味の異なる場合があります。

製造販売業者

RUFUTO 日本ルフト株式会社

■ 本社 医療機器部

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-7-5 協販ビル
TEL: 03-3518-2001 FAX: 03-3518-6001

■ メディカルサービスセンター

〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内谷7-2-1
TEL: 048-839-0622 Fax: 048-838-3532

🌐 <https://www.nihon-rufuto.com/>



ISO 13485:2003 認証取得

ご用命は