


# カニューラの長期間のご使用で 耳の痛みでお困りの患者さまに

## カニューラ用 ヘアキャップ ヘアバンド



- カニューラ装着時の耳の痛みを解消します。
- カニューラを耳にかける必要はありません。  
外れる心配もありません。

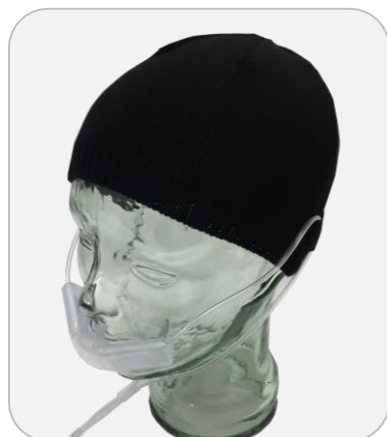


### カニューラ用ヘアキャップ


定 価 : 税別2,700円※  
型 番 : OXY-CAP  
サイズ : フリー  
カラー : 黒

### カニューラ用ヘアバンド


定 価 : 税別2,700円※  
型 番 : OXY-BND  
サイズ : フリー  
カラー : 黒

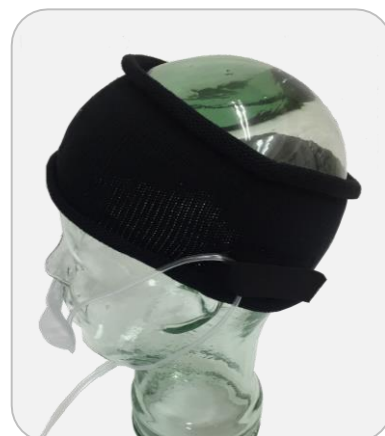



## カニューラ用ヘアキャップ・ヘアバンドの使い方

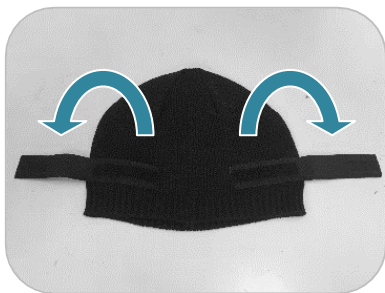



キャップ、バンドを  
机に置いて  
マジックテープを外す

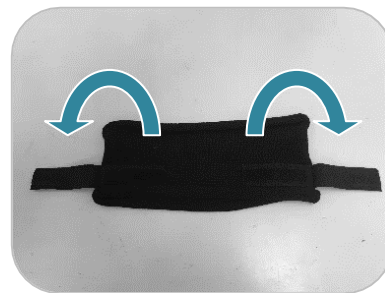

手前が後頭部となるように  
カニューラを取り付ける

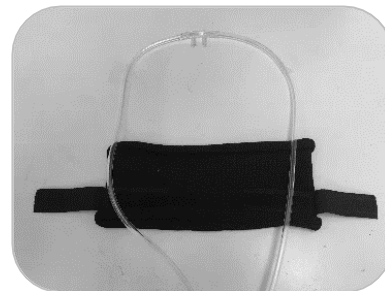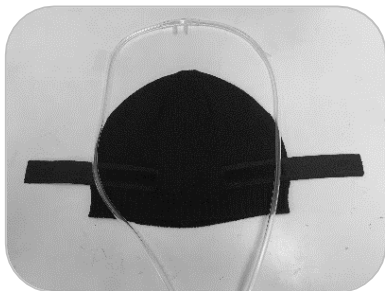

マジックテープを取り付ける

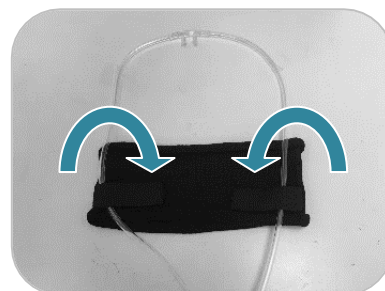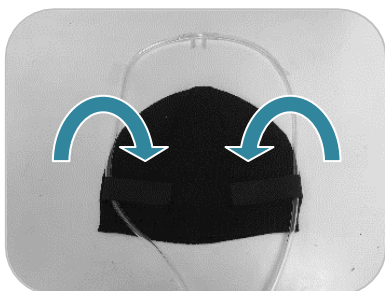

ヘアバンド・ヘアキャップを  
頭にかぶり、カニューラを  
鼻孔に装着する



※ 製品改良の為、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。また、印刷物と実物では多少色味の異なる場合があります。

製造販売業者

 **RUFUTO** 日本ルフト株式会社

■ 本社 医療機器部

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-7-5 協販ビル  
TEL: 03-3518-2001 FAX: 03-3518-6001

■ メディカルサービスセンター

〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内谷7-2-1  
TEL: 048-839-0622 Fax: 048-838-3532

 <https://www.nihon-rufuto.com/>

ご用命は

OXY2410